


## synapsis® wave 2

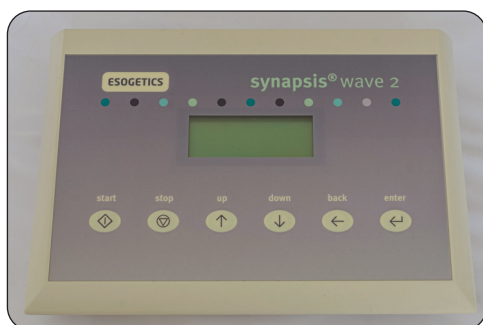

## BEDIENUNGSANLEITUNG



# Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Beschreibung, Zweckbestimmung und Wirkung	4
1.1	Allgemeine Beschreibung	4
1.2	Medizinische Zweckbestimmung Literatur/Schulungen zur Elektrotherapie-Stimulation (Induktionstherapie):	4
1.3	Benutzergruppen, vorgesehene Patienten, Einsatzumgebung	4
2.	Inbetriebnahme – Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
2.2	So starten Sie eine Anwendung	6
3.	Kontraindikationen, Nebenwirkungen, Warnhinweise	8
3.1	Kontraindikationen	8
3.2	Nebenwirkungen	8
3.3	Warnhinweise	8
4.	Häufigkeit und Pausen zwischen den Anwendungen	8
5.	Reinigung und Pflege	8
6.	Kontrolle, Wartung und Reparatur	9
6.1	Kontrolle des ordnungsgemäßen Betriebs	9
6.2	Wartungsmaßnahmen	9
7.	Garantie	10
8.	Technische Daten Steuergerät	10
9.	Angewandte Normen und Richtlinien Anhang	11
10.	Symbole: Anhang 1 – EMV-Tabellen	12
		15

## **1. Allgemeine Beschreibung, Zweckbestimmung und Wirkung**

### **1.1 Allgemeine Beschreibung**

Das Elektrotherapie-System Synapsis home 2 erzeugt niederfrequente Pulsationen mit sehr geringer Spannungsamplitude und spezifischen Frequenzabläufen, die auf die Handgelenke oder punktuell auf Zonen und Akupunkturpunkte der Haut (*Stratum corneum*) appliziert werden.

Aufgrund der angewandten, sehr geringen Spannungen findet eine sehr geringe Energieübertragung statt. Die Wirkung beruht auf der Energieübertragung applizierter, rhythmischer Signale mit der empfindlichen Oberflächensensorik der Haut und deren regulatorischer Wechselwirkung mit wesentlichen Hirnarealen. Die applizierten spezifischen Frequenzabläufe umfassen den Bereich von 1 Hz bis 100 Hz und entsprechen damit den Frequenzabläufen des menschlichen Gehirns.

### **1.2 Medizinische Zweckbestimmung**

Der Zweck der generischen Produktfamilie Synapsis ist die unterstützende Anwendung bei Stimmungsschwankungen, bei mentalen Erschöpfungen/Stresserscheinungen und bei Schlafstörungen mittels Elektrotherapie-Stimulation, die durch Applikation des Gerätes über Manschetten auf die Handgelenke und/oder über Klebeelektroden oder einen Punkt-Applikator punktuell auf Zonen und Akupunkturpunkte der Haut (*Stratum corneum*) erreicht wird.

Das Internationale Mandel-Institut, Esogetics GmbH und Partner der Esogetics GmbH bieten Ausbildungen/Schulungen zur Elektrotherapie (Induktionstherapie) an.

### **Literatur/Schulungen zur Elektrotherapie-Stimulation (Induktionstherapie):**

Peter Mandel, Schriftenreihe Esogetische Medizin: „Die Induktionstherapie“;

Robert Füß: Die Induktionstherapie, Esogetics GmbH, Bruchsal.

### **1.3 Benutzergruppen, vorgesehene Patienten, Einsatzumgebung**

Vorgesehene Benutzer sind eingewiesene Anwender und von geschultem Fachpersonal eingewiesene Anwender.

Das Gerät Synapsis wave 2 wird in der Praxis angewendet.

Die Synapsis 2 Geräte können bei allen Anwendern mit einem Mindestalter von 9 Jahren, ungeachtet der Größe, des Gewichts und des Geschlechts, angewendet werden.

## 2. Inbetriebnahme – Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Das Elektrotherapie-System Synapsis wave 2 besteht aus einem Standgerät, welches mit einem externen Netzteil betrieben wird, einem Verbindungskabel und der Gebrauchsanweisung. Das Gerät Synapsis wave 2 ist in einer Box mit den Zubehörteilen verpackt (Abb. 1).

Abb. 1: Gerät, Verbindungskabel, Gebrauchsanweisung und Verpackung



Bei der Inbetriebnahme ist ein zugelassenes Netzteil an der Rückseite des Gerätes anzuschließen und mit dem Stromnetz zu verbinden. Dazu stecken Sie den Rundstecker des Netzteils in die Rückseite des Gerätes und verbinden das Netzteil mit dem Stromnetz (Abb. 2).

Abb. 2: Synapsis wave 2 Gerät von hinten mit dem Netzteil



Das Gerät Synapsis wave 2 verfügt weiter über eine Buchse zum Anschluss des Verbindungskabels (Abb. 3).

Abb. 3: Gerät/ Buchse

Das Verbindungskabel des Gerätes Synapsis wave 2 verfügt über eine Schnittstelle, die zur bestimmungsgemäßen Anwendung mit Handelswaren wie zugelassenen Klebeelektroden und zugelassenen Handmanschetten, verbunden und betrieben wird.



Zur Inbetriebnahme stecken Sie den Rundstecker des Verbindungskabels in die Buchse an der Geräterückseite. Orientieren Sie sich dazu an den beiden roten Punkten (Abb. 3).

Abb. 4: Gerät, Verbindungskabel und Manschetten



Verbinden Sie jeweils das andere Ende mit den zugelassenen Handmanschetten (Abb. 4) oder zugelassenen Klebeelektroden (Abb. 5). Das Gerät ist damit funktionsfähig.

Abb. 5: Gerät, Verbindungskabel und Klebeelektroden

## 2.2 So starten Sie eine Anwendung

Zu Beginn einer Anwendung legen Sie die Manschette am linken Handgelenk an und die andere Manschette am rechten Handgelenk (Abb. 6).


Wahlweise positionieren Sie die Einmalelektroden am Handgelenk (Abb. 7).



Abb. 6 und 7: Gerät, Verbindungskabel und Manschetten bzw. Klebeelektroden am Handgelenk

Nach entsprechender Schulung/Ausbildung können die Klebeelektroden (Einmalelektroden) unter Berücksichtigung der angegebenen Anwendungsbereiche (siehe 1.2 Zweckbestimmung) an die ausgewählten Zonen und Akupunkturpunkte der Haut (Stratum corneum) positioniert werden.

Zum Einschalten des Gerätes schalten Sie den Netzschalter an der Geräterückseite auf EIN, das Gerät ist nun betriebsbereit.

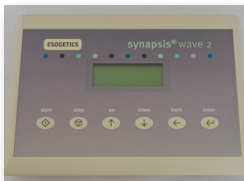






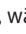

Mit der Taste  gelangen Sie in das Auswahlmenü. Mit der Taste  und der Taste  wählen Sie das gewünschte Programm und zum Bestätigen des Programms drücken Sie ein weiteres Mal die Taste .

Abb. 8: Synopsis wave 2 Gerät von oben mit den Tasten

Nun zeigt das Display das ausgewählte Programm und die Laufzeit, sowie die Bereitschaft des Programms. Zum Starten des Programms drücken Sie bitte die Taste . Sie sehen im Display, dass das Programm in der eingestellten Zeit und Frequenz läuft. Um das Programm vorzeitig abzubrechen, drücken Sie die Taste , Um zurückzukommen, wählen Sie die Taste . Falls keine Anwendung aktiv ist, schalten Sie bitte Ihr Gerät an der Rückseite aus. Der Rundstecker kann zwischen den Anwendungen in der Buchse verbleiben.


Falls Sie ihr Gerät längere Zeit nicht benutzen, stecken Sie den Rundstecker ab.

Es können weitere Programme auf das Gerät gespeichert werden. Dafür wird Ihnen zum Speichern zusätzlicher Programme eine SD Karte zugesandt.



Abb. 9 und 10: Synapsis wave 2 Gerät von hinten mit SD Karte


Um das Programm zu speichern, gehen Sie wie folgt vor: Schalten Sie den Netzschalter an der Geräterückseite auf 0 (Aus). Legen Sie die Chipkarte an der Rückseite des Gerätes ein (Abb. 9). Dabei zeigen die Kontakte nach unten.

Schalten Sie den Netzschalter an der Geräterückseite auf I (Ein). Drücken Sie die Taste .



Das Gerät speichert die zusätzlichen Programme. Entnehmen Sie die SD Karte aus dem Gerät. Durch leichtes drücken kommt durch den Federmechanismus die SD Karte aus dem Gerät (Abb. 11).

Abb. 11: Synapsis wave 2 Gerät von hinten mit SD Karte

 **Warnhinweis:** Die Schnittstelle ist ausschließlich zur Verwendung mit der SD Karte zum Speichern neuer Programme zugelassen. Dazu muss zuvor die Verbindung getrennt werden. Verbindungen mit anderen Geräten bedingen deren Zulassung.



### **3. Kontraindikationen, Nebenwirkungen, Warnhinweise**

#### **3.1 Kontraindikationen**

- Schwangerschaft
- schwere Herzmuskelerkrankungen oder schwere Herzrhythmusstörungen
- Herzschrittmacher, vor allem bei Anwendungen am Oberkörper
- Behandlung in der Nähe des Karotissinus (seitlich am Hals)
- Behandlungen auf verletzter Haut oder offenen Wunden oder sonstige invasive Anwendung.



#### **3.2 Nebenwirkungen**

Bei Beachtung obiger Kontraindikationen und bei bestimmungsmäßiger Anwendung sind Nebenwirkungen nicht bekannt. Sollten trotzdem unerwünschte Nebenwirkungen oder Vorfälle auftreten, so sind diese unverzüglich an den Hersteller Esogetics GmbH in Bruchsal zu berichten.



#### **3.3 Warnhinweise**

Bei folgenden Symptomen oder Indikationen sollte vor einer Behandlung mit dem Synapsis wave 2 unbedingt der behandelnde Arzt oder Heilpraktiker zu Rate gezogen werden:

- Hochentzündliche fieberhafte Erkrankungen
- fortgeschrittene bösartige Tumore
- Thrombosen
- Psychosen
- Epilepsie
- spastische Lähmungen
- entzündliche Hautveränderungen
- Implantate mit Metallteilen im Behandlungsgebiet
- aktive Implantate

Das Gerät Synapsis wave 2 darf nicht in der Nähe (Mindestabstand 1 m) eines Kurzwellen- oder Mikrowellen-Therapiegerätes angewandt werden. Der gleichzeitige Anschluss des Patienten an ein Hochfrequenz-Chirurgiegerät während der Behandlung mit dem Synapsis wave 2 System ist unzulässig.


### **4. Häufigkeit und Pausen zwischen den Anwendungen**

Die Anwendung der Programme kann täglich erfolgen. Die Programmdauer beträgt max. 45 Minuten. Es ist die Anwendung von max. einem Programm pro Tag empfohlen.

### **5. Reinigung und Pflege**

Das Synapsis wave 2 benötigt keine besondere Wartung. Gehäuse und Zubehör können mit einem feuchten Tuch und üblichen milden Haushaltsreinigern und Flächendesinfektionsmitteln gereinigt werden.



 **Warnhinweis:** Verwenden Sie auf keinen Fall organische Lösungsmittel oder scharfe Haushaltsreiniger, um das Gerät zu reinigen. Diese Stoffe können das Gehäuse oder die Folientastatur beschädigen.

 Für die Reinigung der Manschetten beachten Sie die Pflege- und Reinigungsvorschriften des Herstellers.

 Beachten Sie auch die Angaben des Herstellers zur Lebensdauer der Handmanschetten.

## 6. Kontrolle, Wartung und Reparatur

### 6.1 Kontrolle des ordnungsgemäßen Betriebs




Abb. 12

Zur Kontrolle des ordnungsgemäßen Betriebs verfügt das Gerät über eine Kontrollleuchte (Abb. 12/B) über den Buchsen für den Rundstecker an der Geräterückseite. Zur Überprüfung des ordnungsgemäßen Betriebs stecken Sie den Rundstecker in eine der Buchsen an der Geräterückseite (Abb. 12/A). Schließen Sie die Manschetten an das Verbindungskabel an und starten Sie eine Anwendung wie in Kapitel 2.2 beschrieben.



Abb. 13

Halten Sie die silberbeschichtete Seite der Manschetten (Abb. 13/A) gegeneinander, so dass die Flächen sich berühren.

Bei ordnungsgemäßen Betrieb blinkt die orangefarbene Kontrollleuchte (Abb. 12/B). Beenden Sie das Programm durch betätigen der Taste .

### 6.2 Wartungsmaßnahmen

Das Gerät bedarf keiner Wartungsmaßnahmen. Bei Unklarheiten oder Reklamationen hinsichtlich der Funktion wenden Sie sich direkt an den Hersteller, Esogetics GmbH in Bruchsal.

Reparaturen oder sonstige Veränderungen am Gerät sind ausschließlich vom Hersteller oder von einer von ihm autorisierten Person auszuführen.

Für unsachgemäße Veränderungen und Handhabungen, die nicht dem beschriebenen Verwendungszweck entsprechen, kann keine Haftung übernommen werden.

## 7. Garantie

Die Garanzzeit für Ihr Gerät beträgt 1 Jahr ab Kaufdatum. Sollte Ihr Gerät trotz sachgemäßer Anwendung einmal nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller. Er wird dafür sorgen, dass Ihr defektes Gerät umgehend instandgesetzt wird oder Ihnen einen gleichwertigen Ersatz anbieten.

## 8. Technische Daten Steuergerät

Typenbezeichnung:	Synapsis wave 2
Versorgungsspannung:	12 V
Nennaufnahme:	70 mA
Bauart:	Tischgerät
Schutzart:	IP 40
Anwendungsdauer:	max. 45 min.
Ausgangsspannung (unbelastet):	5 V pp; 1,6 V rms
Ausgangsspannung (belastet 1 kOhm):	5 V pp; 0,5 V rms
Ausgangstrom (belastet 1 kOhm):	0,5 mA
Ausgangsfrequenz:	1 Hz – 100 Hz
Gewicht:	1200 g
Abmessungen:	300 x 227 x 54 mm
Betriebsbedingungen:	+5°C bis 35°C
Lagerung:	-20°C bis 70°C
Luftdruck:	800 hPa bis 1.030 hPa
Luftfeuchtigkeit:	30% bis 93%

### Packungsinhalt:

Steuergerät Synapsis wave 2, Gebrauchsanweisung, 2 Verbindungskabel für Manschetten.

### Ersatzteile und Zubehör:

Ersatz Verbindungskabel



## **9. Angewandte Normen und Richtlinien**

Elektrische Sicherheit DIN EN 60601-1:2013  
Elektromagnetische Verträglichkeit DIN EN 60601-1-2:2016



### **Hersteller:**

Esogetics GmbH, Hildastr. 8, D-76646 Bruchsal,  
Deutschland

Telefon: +49 (0) 7251/800 10, Fax: +49 (0) 7251/800 155

Web: [www.esogetics.com](http://www.esogetics.com)

Mail: [Info-de@esogetics.com](mailto:Info-de@esogetics.com)

### **Download der Gebrauchsanweisung unter:**

[www.esogetics.com/downloads](http://www.esogetics.com/downloads)

Esogetics ist Hersteller von Wellnessprodukten und ist als Medizinproduktehersteller registriert und verfügt über ein zertifiziertes und überwachttes Qualitätsmanagementsystem.

## Anhang

### 10. Symbole:



Auswahl bestätigen



Zurück



Nach unten blättern (Programmwahl)



Nach oben blättern (Programmwahl)

Laufendes Programm vorzeitig beenden



Angezeigtes Programm starten



Die Konformität entsprechend EU-Konformitätsregeln für das Gerät mit dem CE-Zeichen bestätigt.



Verweist auf die Notwendigkeit für den Anwender, die Gebrauchsanweisung zu Rate zu ziehen.



Gerätetyp BF gemäß IEC/EN 60601-1



Verweist auf die Notwendigkeit für den Anwender, die Gebrauchsanweisung auf wichtige sicherheitsbezogene Angaben, wie Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen durchzusehen, die aus einer Vielzahl von Gründen nicht auf dem Medizinprodukt selbst angebracht werden können.



Zeigt den Hersteller des Produktes an.



Das durchgestrichene Mülleimer-Zeichen auf Ihrem Produkt bedeutet, dass es sich bei diesem Produkt um ein Elektro- und Elektronikgerät handelt, für das spezielle Entsorgungsbestimmungen zur Anwendung kommen. Zur Durchsetzung von Recycling, zur WEEE - Entsorgung entsprechend der Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment) und zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit verlangen europäische Bestimmungen die selektive Sammlung von Altgeräten auf eine der folgenden beiden Möglichkeiten:

- Ihr Händler nimmt Ihr Altgerät gerne zurück, wenn Sie ein Neugerät bei ihm kaufen.
- Altgeräte können auch in dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.



Bezeichnet werden die Temperaturgrenzwerte, denen das Medizinprodukt sicher ausgesetzt werden kann.



Bezeichnet den Feuchtigkeitsbereich, dem das Medizinprodukt sicher ausgesetzt werden kann.



Bezeichnet den Bereich des Luftdrucks, dem das Medizinprodukt sicher ausgesetzt werden kann.



Polung des Netzteils beachten



Seriennummer

### Serien-Nr.

Die Serien-Nr. Ihres Synapsis-Gerätes ist wie folgt aufgebaut:

**XX** **JJJJ** - **xxxxx** — lfd. Serien-Nr.

└─ Produktionsjahr

└─ Gerätebezeichnung

(**SP 2** = „point 2“; **SW 2** = „wave 2“; **SH 2** = home 2“)

### Beispiel:

SH 2 2017 03937 = synapsis home 2 aus 2017 mit der Nr. 3937.



# **Anhang 1**

## **EMV-Tabellen**

**Leitlinien und Herstellererklärung  
Elektromagnetische Aussendungen**

**Warnung:** Die Verwendung dieses Geräts neben oder in Verbindung mit anderen Geräten sollte vermieden werden, da dies zu Fehlfunktionen führen kann. Wenn eine solche Verwendung notwendig ist, sollten diese Ausrüstung und die andere Ausrüstung beobachtet werden, um zu überprüfen, dass sie normal funktionieren.

**Warnung:** Die Verwendung von Zubehör, Wandlern und Kabeln, die nicht vom Hersteller dieses Geräts angegeben oder zur Verfügung gestellt werden, kann zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen oder einer verringerten elektromagnetischen Immunität des Gerätes führen und dessen unsachgemäßen Betrieb bedingen.

**Warnung:** Tragbare HF-Kommunikationsgeräte (einschließlich Peripheriegeräten wie Antennenkabeln und externen Antennen) sollten nicht näher als 30 cm (12 Zoll) an irgendeinem Teil des synopsis wave 2 verwendet werden.

Das synopsis wave 2 ist für den Betrieb in einer wie unten angegebenen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Anwender des synopsis wave 2 sollte sicherstellen, dass es in einer derartigen Umgebung betrieben wird. Nicht erwähnte Prüfabschnitte sind für das synopsis wave 2 nicht anwendbar.

Störaussendungen	Übereinstimmung	Elektromagnetische Umgebung – Leitfaden
HF-Aussendungen CISPR 11	Gruppe/Group 1	Das synopsis wave 2 verwendet HF-Energie ausschließlich zu seiner internen Funktion. Daher ist seine HF-Aussendung sehr gering, und es ist unwahrscheinlich, dass benachbarte elektronische Geräte gestört werden.
HF-Aussendungen CISPR 11	Klasse/Class B	Das synopsis wave 2 ist für den Gebrauch in allen Einrichtungen einschließlich denen im Wohnbereich und solchen, geeignet, die unmittelbar an ein öffentliches Versorgungsnetz angeschlossen sind, das auch Gebäude versorgt, die zu Wohnzwecken benutzt werden.



**Leitlinien und Herstellererklärung  
Elektromagnetische Aussendungen**

Das synopsis wave 2 ist für den Betrieb in einer wie unten angegebenen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Anwender des synopsis wave 2 sollte sicherstellen, dass es in einer derartigen Umgebung betrieben wird (häusliche Pflegeumgebung - außer im Freien, Fahrzeugen und an öffentlichen Orten).

Nicht erwähnte Prüfabschnitte sind für das synopsis wave 2 nicht anwendbar.

<b>Störfestigkeitsprüfungen</b>	<b>IEC 60601 Prüfpegel</b>	<b>Übereinstimmungspegel</b>	<b>Elektromagnetische Umgebung – Leitlinien</b>
Entladung statischer Elektrizität (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV Kontaktentladung  ± 15 kV Luftentladung	± 8 kV  ± 15 kV	Fußböden sollten aus Holz oder Beton bestehen oder mit Keramikfliesen versehen sein. Wenn der Fußboden mit synthetischem Material versehen ist, muss die relative Luftfeuchte mindestens 30 % betragen.
Magnetfelder bei der Versorgungsfrequenz (50/60) Hz IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Magnetfelder bei der Netzfrequenz sollten den typischen Wert, wie sie in der Geschäfts- und Krankenhausumgebung vorzufinden sind, entsprechen.
Geleitete HF-Störgrößen IEC 61000-4-6	V <sub>1</sub> = 6 Vrms 150 kHz – 80 MHz V <sub>1</sub> =	6 Vrms	
Gestrahlte HF-Störgrößen IEC 61000-4-3	E <sub>1</sub> = 10 V/m für häusliche Gesundheitsumgebung 80 MHz – 2,7 GHz	10 V/m	Die Feldstärke stationärer Funkender sollte bei allen Frequenzen gem. einer Untersuchung vor Ort geringer als der Übereinstimmungspegel sein. In der Umgebung von Geräten, die das folgende Bildzeichen tragen, sind Störungen möglich

**Leitlinien und Herstellererklärung - Hochfrequente drahtlose  
Kommunikationseinrichtungen**

<b>Prüf- frequenz (MHz)</b>	<b>Funkdienst / Service</b>	<b>Leistung (W)</b>	<b>Entfernung (m)</b>	<b>Test level (V/m)</b>
385	TETRA 400 (380 ... 390MHz)	1,8	0,3	27
450	GMRS 460, FRS 460 (430 ... 470MHz)	5	0,3	28
710, 745, 780	LTE Band 13/17 (704 ... 787MHz)	0,2	0,3	9
810, 870, 930	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5 (800 ... 960MHz)	2	0,3	28
1720, 1845, 1970	GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900, DECT, LTE Band 1/3/4/25, UMTS (1.7 ... 1.99GHz)	2	0,3	28
2450	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7 (2.4 ... 2.57GHz)	2	0,3	28
5240, 5500, 5785	WLAN 802.11 a/n (5.1 ... 5.8GHz)	0,2	0,3	9

Programmname	Beschreibung der Anwendungsbereiche	t/min
<b>Entspannungsprogramme</b>		
Ruhe 1	Programm zur tiefen, inneren Entspannung	30
Ruhe 2	Bei allen aktuellen Stressbelastungen	30
Schlaf 1	Unterstützt bei Ein- und Durchschlafstörungen	30
Schlaf 2	Reguliert besonders die Schlafrhythmik	45
Traum	Anregung der Traumaktivität	45
<b>Konfliktlösungsprogramme</b>		
Konflikt	Lösen und ordnen von individuellen Konflikten	40
Kinder 1	Bei Belastungen zwischen dem 6. und 9. Lebensjahr	35
Kinder 2	Bei Belastungen zwischen dem 9. und 12. Lebensjahr	35
Gamma lang	Lösung von Blockaden mit der Kraft der Meditationsschwingung	42
Gamma kurz	Lösung von Blockaden über spezifische Reflexzonen	10
<b>Stressprogramme</b>		
StressBasis	Zur Lösung psychischer Verkrampfungen	30
StressImmun	Zur Unterstützung bei stressbedingten Belastungen des Immunsystems	35
StressHormon	Zur Unterstützung bei stressbedingten Belastungen des hormonellen Symptomen	40
StressKrampf	Basisprogramm zur Unterstützung bei stressbedingten cerebralen Verkrampfungen	42
<b>Depression/Psyche</b>		
Psyche 1	Zur Unterstützung bei Müdigkeit, Erschöpfung, Abgeschlagenheit	30
Psyche 2	Zur Unterstützung bei Nervosität und Stimmungsschwankungen	30
Psyche 3	Zur Unterstützung bei hormonellen Stimmungsschwankungen	38
<b>Cerebral/Mentale Programme</b>		
Cerebral	Aktivierung der Gehirntätigkeit, Steigerung der Wachheit	35
Lernen	Unterstützt bei Lernschwäche und Konzentrationsstörung	35
Erinnerung	Steigerung der intellektuellen Fähigkeit, Anregung der Kreativität	35
<b>Weitere Programme:</b>		
Erwachen	Zur Unterstützung bei Erschöpfung, Rekonvaleszenz, unüberwindliche Müdigkeit, Altersbeschwerden	35
Degeneration	Aufbauprogramm tiefer Erschöpfung und Lösung von Blockaden	45
Power-Nap	Regenerationsprogramm zum Abbau des täglichen Stress	15
Sucht	Zur Unterstützung bei stressbedingten Suchtbelastungen	45

**esogetics GmbH**

Hildastr. 8 • D-76646 Bruchsal

Tel. +49 (0)72 51/80 01-0 • Fax 80 0155

info-de@esogetics.com

**www.esogetics.com**

**esogetics GmbH – Niederlassung**

Hirschmattstr. 16 • CH-6003 Luzern

Tel. +41 (0)41/4 20 58 36 • Fax 4 20 59 36

info-ch@esogetics.com

**www.esogetics.com**

V5.1: 10/2024